



Motoråg

Tilbehør til Luna
IPx4

Brugermanual

Vigtig information

Brugermanualen skal læses grundigt inden produktet tages i brug!

Brugermanualen henvender sig til plejepersonale og andre brugere, samt til teknikere i forbindelse med servicering og vedligeholdelse af produktet.

Dato: 06-03-2018

Version: 1



Scan QR koden for mere information

Indholdsfortegnelse

1 FORMÅL OG SIKKERHED

1.1	Formål	4
1.2	Sikkerhedsinstruktioner	4
1.3	Inden brug	4
1.4	Terminologi	5
1.5	Udpakning	5
1.6	Transport	5

2 MONTERING OG BETJENING

2.1	Montering af motoråg	6
2.2	Betjening	6

3 ANVENDELSE

3.1	Anvendelige sejl	7
3.2	Fra seng til stol	7
3.3	Fra stol til seng	7

4 VEDLIGEHOLDELSE

4.1	Rengøring	8
4.2	Opbevaring	8

5 EFTERSYN, GARANTI OG FEJLFINDING

5.1	Årlige eftersyn	8
5.2	Fejlfinding	9

6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG DIMENSIONER

6.1	Tekniske specifikationer	9
6.2	Dimensioner	10

7 MILJØ OG KVALITET

7.1	Bortskaffelse	11
7.2	Kvalitetsgodkendelser	11
7.3	Symboler og forkortelser	11

1 FORMÅL OG SIKKERHED

Motoråget er et tilbehør til Luna IPx4 2 kanal og virker som et dynamisk positioneringssystem.

Motoråget er elektrisk, hvilket betyder, at det betjenes af håndbetjeningen til Luna IPx4.

Dette tillader en motoriseret placering af patienten, hvilket resulterer i mindre anstrengelse for plejeren.

Løftekapaciteten er 275 kg.

1.1 Formål

Formålet med produktet er at lette flytningen af patienter fra siddende position til liggende position og omvendt. Motoråget tillader plejeren at justere vinklen af patienten i sejlet, for en mere komfortabel og optimal position.

Produktet er egnet til alle typer patienter, specielt patienter som har svært ved at nå en 90 graders siddende position, for eksempel på grund af deres medicinske tilstand.

Efter grundig rengøring kan produktet anvendes af flere patienter.

NOTE! Motoråget må ikke anvendes til andre formål end oprindelig tiltænkt.

1.2 Sikkerhedsinstruktioner



Vigtig advarsel!

Denne brugermanual skal læses grundigt før brug af produktet.

- Brug **ALDRIG** motoråget, hvis der er tegn på slitage eller mistanke om andre defekter på skinnesystem, Luna eller på selve produktet. I sådanne tilfælde skal produktet tages ud af drift og forhandler eller WinnCare Nordic kontaktes.
- Det skal sikres, at hverken plejeren eller patienten kan komme til skade under løft og flytning. Tjek altid omgivelserne og fjern forhindringer.
- Før løft af patient skal det sikres, at sejlet er monteret korrekt.


NOTE! Læs brugermanualen for Luna IPx4 før brug af motoråget.

1.3 Inden brug

Plejeren/brugeren er ansvarlig for at tjekke følgende inden brug:

- Plejeren har modtaget instruktion eller læst brugervejledningen for produktet.
- Sikre at det årlige serviceeftersyn er udført.
- Ved tvivlstilfælde om anvendelsen af produktet, kontaktes forhandler eller WinnCare Nordic for råd og vejledning.

1.4 Terminologi

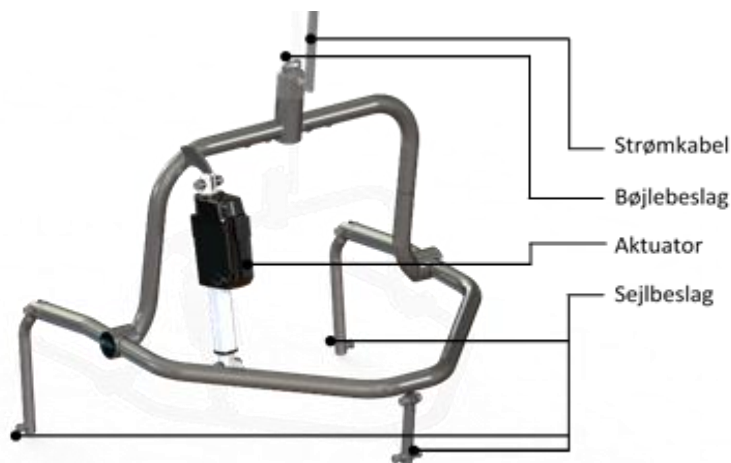

1.5 Udpakning

Ved udpakning skal det tjekkes, at alle dele er til stede og ubeskadiget. Hvis der er mistanke om beskadigelse eller manglende dele, kontaktes forhandler eller WinnCare Nordic.

Det anbefales, at emballagen opbevares til senere transport eller ved returnering.

Kassens indhold:

- 1) Motoråg
- 2) Brugermanual
- 3) Label til håndbetjening



1.6 Transport

Produktet transporteres sikrest ved at anvende den originale emballage, hvor der er printet informationer om håndteringen af produktet.

Såfremt produktet skal returneres, skal den originale emballage anvendes. I tilfælde af manglende original emballage, skal produktet beskyttes sikkert på anden måde under transport.

Der er skrevet symboler på indpakningen til at vejlede transportfirmaer.

2 MONTERING OG BETJENING


2.1 Montering af motoråg

Montering

Motoråget monteres på samme måde som andre WinnCare Nordic åg til strop.

- 1) Løft motoråget. Hold i stroppen og tryk låsefjederen på krogen ind.
- 2) Monter krogen på bøjlebeslaget på motoråget og giv slip på låsefjederen.
- 3) Det skal sikres, at krogen er sikkert monteret på bøjlebeslaget.
- 4) Forbind strømkablet til Luna. Stikket er placeret på den modsatte side af stikket til håndbetjeningen.

Motoråget er klar til brug, hvis instruktionen er fuldt korrekt.

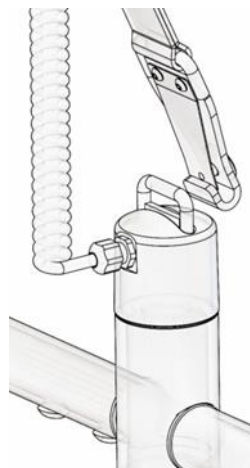

Afmontering


- 1) Frigør strømkablet.
- 2) Tryk låsefjederen på krogen ind.
- 3) Vip-krogen for at afmontere motoråget.

2.2 Betjening

Betjening af produkt

- 1) Forbind håndbetjeningen til Luna loftliften.
- 2) Tryk på en af de vandrette knapper (A/B) for at aktivere produktet.

Knappen A flytter produktet til siddende position og knap B til liggende position som det ses på piktogrammet.

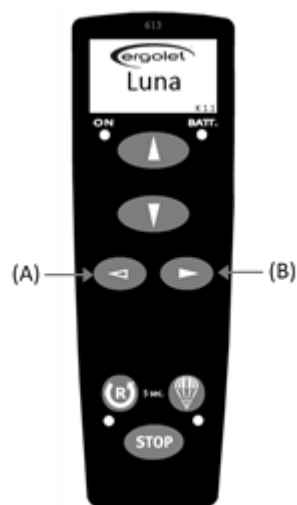

3 ANVENDELSE

3.1 Anvendelige sejl



Vigtig advarsel!


Brug kun sejl beregnet til produktet.

Motoråget er godkendt med sejl af typen med clipsophæng som eks. vist til højre.

Alle 4 clipsophæng SKAL anvendes for at sikre den rette stabilitet af produktet.

Det skal sikres at alle 4 clipsophæng er monteret korrekt, før et løft udføres.

Ved tvivlstilfælde kontaktes WinnCare Nordic for assistance til at vælge det korrekte sejl.

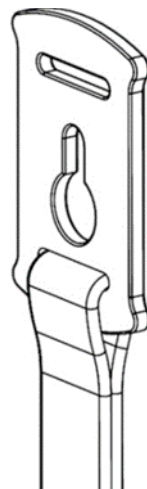


3.2 Fra seng til stol

Når en patient løftes fra en seng skal motoråget være indstillet til liggende position.

For en jævn forflytning kan plejeren benytte sengens hovedgærdefunktion, hvis denne er tilgængelig.

Placer patienten i halvt-liggende stilling og anvend produktets justeringsmuligheder til at positionere patienten mest hensigtsmæssigt, for at få den bedste håndtering af patienten.

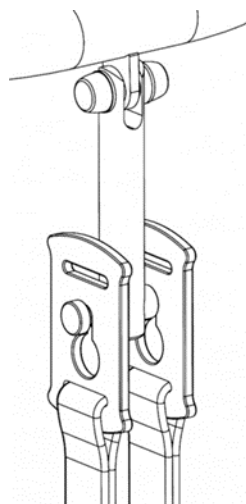

3.3 Fra stol til seng

Når en patient løftes fra en stol eller lignende indstilles motoråget til siddende position.

Hvis det er en kørestol med anti-tip funktion kan denne bruges til at placere patienten.

For lettere fastgørelse af sejlet på de bagerste clipsophæng kan motoråget vinkles en smule, efter at de forreste clips er fastgjort.

4 VEDLIGEHOLDELSE

4.1 Rengøring

Motoråget rengøres bedst med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler og ren klud. Kemikalier og andre stærke rengøringsmidler må ikke anvendes.

4.2 Opbevaring

Produktet skal opbevares i tørre omgivelser med en relativ luftfugtighed, der ikke overstiger 70%.

5 EFTERSYN, GARANTI OG FEJLFINDING

5.1 Årlige eftersyn

Produktet skal altid vedligeholdes og repareres af kvalificeret personale.

Producenten, WinnCare Nordic foreskriver at produktet SKAL efterses af en kvalificeret person mindst en gang årligt i henhold til WinnCare Nordics servicepunkter. Årligt eftersyn er også anbefalet i henhold til gældende harmoniserede standard ISO 10535 for personlifte.

Det påhviler ejeren, at sikre at dette eftersyn gennemføres.

Følgende punkter skal gennemgås ved det årlige eftersyn:

- Bolte
 - Tjek for løse bolte og møtrikker.
- Aktuator
 - Tjek for støj.
 - Tjek at stemplet er smurt. Smøres hvis nødvendigt.
- Bøjlebeslag med rotation
 - Tjek at plastikhætte med forskrunding og ledning er fastgjort.
 - Tjek at produktet kan dreje uden at stroppen drejer med.
 - Tjek for revner, osv.
- Generel tilstand
 - Brud, slid, tæring, osv.

Hvis det skulle blive nødvendigt at udskifte dele på grund af slitage eller beskadigelse, anbefaler WinnCare Nordic af sikkerhedsmæssige årsager, at der anvendes originale reservedele. Brug af uoriginale reservedele vil medføre, at garantien ikke dækker.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på produktet, under forudsætning af at årlige eftersyn og vedligeholdelse er overholdt som beskrevet under årlige eftersyn og at dette kan dokumenteres. Se yderligere om garanti betingelser på www.WinnCare.dk

5.2 Fejlfinding

Fejl:	Mulig årsag:	Løsning:
Produktet reagerer ikke når håndbetjeningens VENSTRE/HØJRE taster betjenes	Batteri er ikke opladet eller defekt	Oplad Luna loftlift som beskrevet i Luna brugermanual
	Nødstoppet er aktiveret på Luna og det lyser rødt	Deaktiver nødstoppet. Tryk på "R" tasten på håndbetjeningen i 5 sekunder
	Strømkablet er ikke forbundet rigtigt	Tilslut strømkablet som vist i 2.1. Tjek at strømkablet til aktuatoren er forbundet
	Defekt håndbetjening	Tjek om om/ned tasterne på håndbetjeningen virker. Hvis ikke, prøv en anden håndbetjening eller rekvirer en ny hos forhandler eller WinnCare Nordic
	Defekt Luna	Se kapitlet "fejlfinding" i Luna brugermanual


6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG DIMENSIONER

6.1 Tekniske specifikationer

Max kapacitet:	275 kg
Vægt:	7.0 kg
Mål:	575 x 530 x 550 mm
V In:	24 V
Støj:	Ved kørsel uden belastning: 40 dB(A) Ved kørsel med 275 kg: 45 dB(A)
IP-klasse	IPx4
Repositionering	13 sekunder (275 kg)

6.2 Dimensioner

Mål:

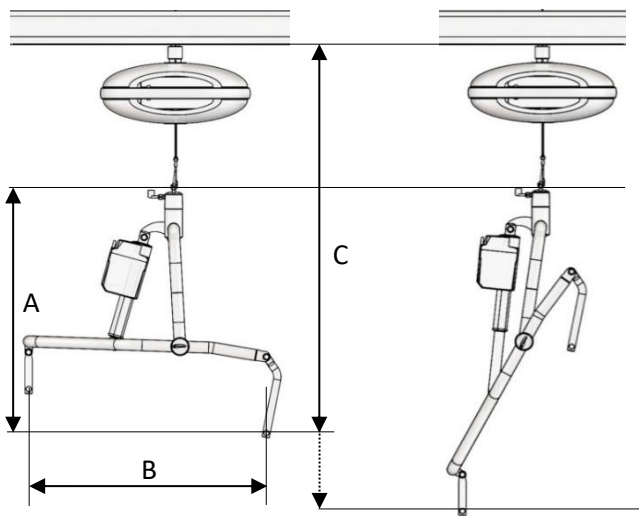

(Alle mål er i mm)

	Liggende position	Siddende position
A) Højde	550	750
B) Bredde	525	170
C) Fra skinne til sejlophængspunkt	864	1070

7 MILJØ OG KVALITET

Produktet har en forventet levetid på mindst 10 år forudsat de foreskrevne serviceeftersyn er overholdt.

7.1 Bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet kan ske til Winncare Nordic, som sikrer, at de enkelte dele og materialer bliver forsvarligt genanvendt eller bortskaffet.

Materialer som indeholder aluminium, bly, ABS plastmaterialer eller stål er miljøskadelige, hvis disse ikke bortskaffes korrekt.



WEEE Recycle

7.2 Kvalitetsgodkendelser

Winncare Nordic er certificeret efter standarderne ISO 9001 og ISO 13485.

Disse certificeringer betyder, at produkterne og virksomheden lever op til de gældende internationale standarder for kvalitetsstyring, samt standarder for sporbarhed for medicinske produkter.

Produktet er klassificeret som et Medicinsk Udstyr, Klasse 1 produkt.

7.3 Symboler og forkortelser



Jævnstrøm



Type B, patienten er ikke adskilt fra jord



Produktet skal genanvendes hvor det er muligt



Referer til brugermanualen

Fabrikant:
Winncare Nordic ApS
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsoer
Denmark

Phone: + 45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Email: info@Winncare.dk
www.Winncare.dk

93/42/EØF CLASS I
EN/ISO 10535
EN 60601-1-2

UM-910-00786DK

